

1

MONTAJE



Seleccione el dispositivo que utilizará: un portátil o un PC. Pegue la base en la superficie seleccionada y espere **mínimo 8 horas**, o elige de situar el Irisbond Duo sobre la mesa delante de la pantalla. Después, una el Irisbond Duo a la peana y adhiera ambos a la base.



2

INSTALACIÓN


Conecte la unidad USB e instale el software de seguimiento de ojos **Primma**.



3

ACTIVAR LICENCIA

Seleccione **Load Activation File**. Una vez en la carpeta del USB, seleccione el archivo de activación. Tiene el siguiente formato: 123456activationPrimma.txt.

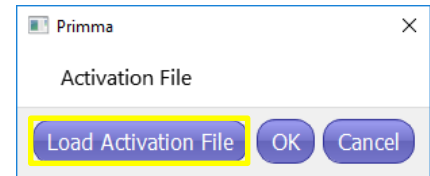

4

CONFIGURACIÓN

Abra **Primma** y seleccione el botón de **Configuración**.



5

USUARIOS

Vaya a la pestaña **Usuarios** y seleccione su idioma. Cree un nuevo usuario para guardar sus preferencias en este perfil de usuario.



6

OPCIONES DE CLIC

Vaya a la pestaña **Opciones Clic**. Elija la opción de clic que utilizará para seleccionar con los ojos: fijación, guiño o clic externo. Ajuste el tiempo necesario para realizar una selección. Utilice **Suavizado** para ajustar la velocidad de movimiento del cursor.



7

POSICIONAMIENTO

Vaya a la pestaña **Configuración** y seleccione **Posicionamiento**. Siga las instrucciones en pantalla.



8

PARAMETROS DE CONFIGURACIÓN

Modifique los parámetros de calibración basados en las necesidades del usuario: seleccione **el ojo/los ojos que utilizará** para el control; en base a la atención y precisión deseadas, decida el **número de puntos de calibración** y modifique el **tiempo de visualización por punto**. Puede personalizar los puntos de calibración con imágenes y/o sonido.



9

CALIBRACIÓN

Haga clic en **Calibrar** y siga los puntos con su mirada. Se recomienda un resultado con valor inferior a 20 ilustrado con puntos verdes. Si es así realice clic en **Aceptar**, si el valor es superior a 20, utilice la opción de **Mejorar**.



10

ACTIVAR SEGUIMIENTO OCULAR

Para iniciar el seguimiento de ojos, haga clic en el **botón de Ratón blanco**. Utilice los botones restantes para facilitar el acceso: realizar doble clic, clic derecho, arrastrar y soltar, opción de lupa etc.

