

1

MONTAGE

Socle



Bases



Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser : un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau. Collez la base sur la surface sélectionnée et **attendez au moins 8 heures**, ou placez la commande Irisbond Duo devant l'écran sur la table. Ensuite, emboîtez la commande Irisbond Duo dans le socle et insérez l'ensemble dans la base.



2

INSTALLATION

Connectez la clé USB à l'ordinateur et installez le logiciel Primma, qui permettra le suivi oculaire.




3

ACTIVER LA LICENCE

Cliquez sur **Load Activation File**. Une fois le dossier de la clef USB ouvert, sélectionnez le fichier d'activation.

Le nom du fichier a la forme suivante :
123456activationPrimma.txt.

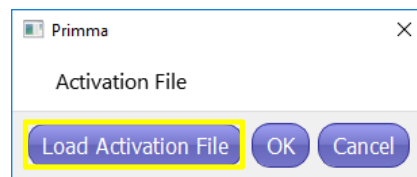

4

CONFIGURATION

Ouvrez **Primma** et cliquez sur **Configuration**.



5

UTILISATEURS


Cliquez sur l'onglet **Utilisateurs** et sélectionnez la langue de votre choix. Créez un nouveau profil pour sauvegarder vos préférences dans ce profil d'utilisateur.



6

OPTIONS DE CLIC

Cliquez sur l'onglet **Options de clic**. Choisissez l'option de clic que vous souhaitez utiliser pour cliquer avec vos yeux : Fixation, Clignement ou Externe. Choisissez le temps nécessaire pour cliquer. Utilisez le **Lissage** pour ajuster la vitesse de mouvement du curseur.

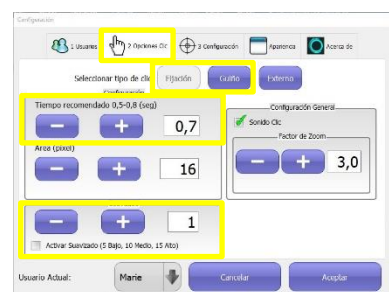

7

POSITIONNEMENT

Cliquez sur l'onglet **Configuration**, puis sur **Positionnement**. Suivez les instructions affichées à l'écran.



8

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

Modifiez les paramètres de calibrage selon vos besoins. Sélectionnez **l'œil/les yeux que vous utiliserez** pour commander. En fonction de l'attention et de la précision souhaitées, choisissez le **nombre de points de calibrage** et modifiez le temps d'affichage **par point**. Vous pouvez personnaliser les points de calibrage avec un son et/ou des images.



9

CALBRAGE

Cliquez sur **Calibrer** et suivez les points du regard. Nous vous recommandons de faire passer tous les points au vert et d'arriver à un résultat inférieur à 20. Ensuite, cliquez sur OK. Si le résultat est supérieur à 20, utilisez l'option Améliorer.



10

ACTIVER LE SUIVI OCULAIRE

Pour démarrer le suivi oculaire, cliquez sur le **symbole de la souris blanche**. Utilisez les autres boutons pour vous faciliter certaines actions : double-clic, clic droit, glisser-déposer, option de loupe, etc.

